

## ESPECIFICAÇÕES BANDAGEM MOVETAPE

### MODELOS:

- MoveTape 5m x 5cm
- MoveTape 32m x 5cm
- MoveTape 5m x 7,5cm

### INDICAÇÃO DE USO

A Bandagem Movetape é indicada para proteger a musculatura e imobilizar membros.

### MECANISMO DE AÇÃO

A bandagem elástica é indicada para proteger a musculatura e imobilizar membros por meio de seu mecanismo de compressão e suporte. Ao aplicar a bandagem de forma adequada, ela envolve a área afetada, proporcionando suporte aos músculos, tendões e articulações. Isso ajuda a reduzir o movimento excessivo, fornecendo estabilidade e proteção durante a atividade física ou recuperação de lesões. Além disso, a compressão da bandagem ajuda a reduzir o inchaço e promover a circulação sanguínea, auxiliando no processo de recuperação.

### MODO DE USO

#### PREPARAÇÃO DA PELE

Antes de aplicar a MoveTape, siga os seguintes passos:

- Certifique-se de que a pele esteja limpa, seca e livre de óleos, cremes ou suor.
- Caso haja pelos muito longos na área de aplicação, recomenda-se raspá-los para melhor aderência.
- Em caso de pele sensível, faça um teste cutâneo aplicando um pequeno pedaço de fita por 24 horas.

#### MEDIDA E RECORTE

- Meça a quantidade de fita necessária para a região a ser aplicada.
- Corte a fita no tamanho adequado utilizando uma tesoura específica para bandagem, evitando desfiamento.
- Arredonde as pontas para melhorar a fixação e evitar o descolamento prematuro.

#### APLICAÇÃO

- Remova o liner protetor (papel de trás) aos poucos, sem tocar na parte adesiva.
- Evite esticar as extremidades da fita ao aplicar para evitar descolamento precoce.
- Aplique a fita com a tensão desejada de acordo com o objetivo: Sem tensão (0%): para estímulo sensorial e drenagem linfática.

1. **Tensão leve (10-25%):** para alívio de dores musculares e suporte leve.
2. **Tensão moderada (25-50%):** para suporte articular e estabilização muscular.
3. **Tensão alta (50-75%):** para maior suporte em lesões específicas (uso com cautela).

- Ative o adesivo friccionando a fita levemente com as mãos após a aplicação.
- Aguarde pelo menos 30 minutos antes de atividades físicas ou contato com água para melhor adesão.

## REMOÇÃO

Para evitar irritações na pele, siga estas recomendações ao remover a MoveTape:

- Umedeça a fita com água morna ou óleo corporal para facilitar a remoção.
- Retire a fita lentamente, puxando-a paralelamente à pele, e não para cima.
- Se sentir resistência, segure a pele com a outra mão para minimizar desconforto.
- Após a remoção, lave a pele com água e sabão neutro e, se necessário, aplique um hidratante suave.

## ADVERTÊNCIAS

### FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO - DESCARTAR APÓS USO

- Produto de uso externo.
- Não aplicar sobre feridas abertas, queimaduras ou irritações na pele.
- Evitar uso em pessoas com histórico de alergia a adesivos acrílicos.
- Interrompa o uso em caso de coceira intensa, vermelhidão ou irritação persistente.
- Não utilizar como único método de tratamento para lesões sem orientação profissional.

## PRECAUÇÕES

### FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO - DESCARTAR APÓS USO

- Consultar um profissional de saúde antes do uso em casos de trombose, diabetes, doenças dermatológicas ou problemas circulatórios severos.
- Não utilizar em gestantes sem recomendação médica.
- Evitar contato direto com água salgada ou produtos químicos para prolongar a durabilidade da fita

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO

- Guardar e transportar em local seco e arejado, longe da umidade e do calor excessivo.
- Evitar exposição direta ao sol para preservar as propriedades do adesivo.
- Manter na embalagem original até o momento do uso.
- Durante o transporte, evitar impacto, umidade e temperaturas extremas.
- Não reutilizar o produto após a remoção.

## PRAZO DE VALIDADE

**3 anos** a partir da data de fabricação, quando armazenado corretamente. Utilizar imediatamente após abrir.

## VARIAÇÕES DE CORES

### Rolo 5mx5cm

**Cores Sólidas:** Bege, Preto, Azul Claro, Azul Escuro, Rosa Claro, Rosa escuro, Verde Claro, Verde Escuro, Verde Água, Vermelho, Lilás, Laranja, Amarelo;

**Camufladas:** Bege, Rosa, Verde e Azul

**Estampadas:** Desenho infantil, Onça e Arco Iris

**Rolo 32mx5cm:** Cor Bege e Preto

**Rolo 5mx7,5cm:** Cor Bege

## ESPECIFICAÇÕES:

- **Material base:** Algodão (96%) e elastano (4%).
- **Adesivo:** Acrílico hipoalergênico.
- **Liner:** Papel siliconado protetor do adesivo.
- **Modelos disponíveis:**

MoveTape 5m x 5cm.

MoveTape 32m x 5cm.

MoveTape 5m x 7,5cm.

1. **Cores disponíveis:** Variadas conforme catálogo.
2. **Resistência à água:** Sim, pode ser utilizado durante banhos e atividades físicas.

**MODELOS COMERCIAIS:**

- MoveTape 5m x 5cm Bege; MoveTape 5m x 5cm Preto; MoveTape 5m x 5cm Azul Claro; MoveTape 5m x 5cm Azul Escuro; MoveTape 5m x 5cm Rosa Claro; MoveTape 5m x 5cm Rosa Escuro; MoveTape 5m x 5cm Verde Claro; MoveTape 5m x 5cm Verde Escuro; MoveTape 5m x 5cm Verde Água; MoveTape 5m x 5cm Vermelho; MoveTape 5m x 5cm Lilás; MoveTape 5m x 5cm Laranja; MoveTape 5m x 5cm Amarelo; MoveTape 5m x 5cm Camuflado Bege; MoveTape 5m x 5cm Camuflado Rosa; MoveTape 5m x 5cm Camuflado Verde; MoveTape 5m x 5cm Camuflado Azul; MoveTape 5m x 5cm Estampado Desenho Infantil; MoveTape 5m x 5cm Estampado Onça; MoveTape 5m x 5cm Estampado Arco Íris; MoveTape 32m x 5cm Bege; MoveTape 32m x 5cm Preto; MoveTape 5m x 7,5cm Bege;

**FABRICADO POR:**

JIANGSU YIZHENG CAREPRO MEDICAL INSTRUMENTS CO, LTD  
NO. 3, JINGXIU ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YIZHENG, JIANGSU -CHINA,  
REPÚBLICA POPULAR

**DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:**

FREITAS REUPKE COMERCIO LTDA  
RUA APENINOS, 664, CONJ 14 EDIF FREEMAN, ACLIMACAO, SÃO PAULO/SP, CEP: 01533-000  
SAC: sac@movetape.com.br  
CNPJ: 34.450.269/0001-91  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARIANA RODRIGUES REUPKE - **CREA-SP:** 5071549500  
Registro ANVISA no: 83125870001